

“耐敷吉” 膠原蛋白傷口敷料

“Life Fusion” Collagen Wound Dressing

衛部醫器製字第004686號

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照醫生指示使用。

產品說明

本產品是由豬真皮組織中萃取之膠原蛋白所組成，具有良好之可吸收性。本產品經過 γ 射線滅菌，為單次使用之高純度膠原蛋白敷料，可覆蓋傷口及吸附體液，提供一個濕潤的環境與空間，避免傷口過於乾燥。

適用範圍

可應用於潰瘍、褥瘡、創傷、淺層燒燙傷或手術傷口等。

使用方法

1. 使用前須清潔傷口，以去除壞死組織或其他雜質，隨後取出膠原蛋白敷料輕輕覆蓋在傷口上。
2. 可以合適之二次敷材固定膠原蛋白敷料。
3. 使用時若傷口表面呈乾燥狀態(無滲出體液)，請先以無菌生理食鹽水將本產品潤濕後再使用。
4. 使用期間視傷口體液的滲出量適時更換本產品，以維持傷口適當的濕潤。更換時若發現敷料附著於傷口上，不要強行取下，僅需以無菌生理食鹽水輕輕沖洗傷口，直至敷料脫離傷口。
5. 將傷口清潔後，重新敷上新的敷料及二次敷材，即完成更換。

警告及禁忌症

1. 對膠原蛋白或豬製品嚴重過敏者請勿使用。
2. 本產品針對妊娠期及哺乳期女性或孩童的使用安全性暫無臨床試驗評估資料，因此醫師應視實際需要狀況衡量使用。
3. 使用本產品後，如果發生下列症狀，立即停止使用並洽詢醫師：

- 感染 ■ 發生紅、腫、痛或皮膚水泡
- 發炎 ■ 過敏或發癢

注意事項

1. 本產品是以放射線滅菌，使用前不需要再重新滅菌。如發現產品透明貼身包裝有破損時請立即停止使用，並請勿使用過期產品及儲存開封後未使用完之產品。
2. 本產品必須原包裝保存，存放於 35°C 以下乾燥環境，不應將產品冷凍或暴露於高溫下。
3. 本產品保存期限為二年，請勿重複使用。

副作用

此產品為高純度之膠原蛋白海綿，在極少數及個別的狀況下不排除有過敏反應，使用過程中，可能併發的副作用如感染、局部發炎、手術部位腫脹及傷口疼痛等。

產品規格

型號	規格	數量/盒
IS0101	30 x 35 x 2 mm	1
IS0102	20 x 20 x 2 mm	1
IS0103	60 x 60 x 2 mm	1
IS0104	30 x 90 x 2 mm	1

製造業者/醫療器材商名稱：惠合再生醫學生技股份有限公司
製造業者/醫療器材商地址：台南市新市區南科二路9號3樓
之1、2

