

“尊爵”醣化血色素分析試劑組

緩衝液 A Plus

衛部醫器輸字第 027200 號

本產品限專業人士使用
使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

型號	01-03-0058	940mL
型號	01-03-0055	3.8L

效能

本試劑僅可用於 Trinity Biotech Premier Hb9210 HbA1c 分析儀。未有其他可替代使用、註冊、清潔或授權的替代試劑。也不可將本試劑用於其他分析使用、註冊、清潔或進行授權。

Premier Hb9210 系統用於定量檢測人體微血管或靜脈血中醣化血色素 (HbA1c)。HbA1c 用於監測糖尿病患者的長期血糖控制情況。

僅供體外診斷使用。 **IVD**

測試概述和說明

HbA1c—對血紅蛋白 A1c 進行評估有助於控制糖尿病。

試劑的性能已經過驗證，以確保測定血紅蛋白 A1c 過程中 Trinity Biotech 試驗和系統的準確度和精密度。

試劑屬於即用型產品。

儲存和穩定性

 於室溫下儲存 (2 - 28°C)。不得冷凍。

 EXP 產品保存期限見容器標籤。如超過保存期限，請勿使用。

注意事項

僅供體外診斷使用。避免與皮膚接觸。有關安全資訊，請參閱產品材料安全資料表 (MSDS)。此試劑用於與血液檢測設備配合使用，請確保在通用的預防措施安全程式前提下使用。

	警告
	可能引起皮膚或嚴重的眼部刺激。可能引起皮膚過敏反應。
	處理後務必徹底洗手。
	請穿戴防護手套、防護服、護目鏡和面部防護裝置。
	若接觸到皮膚：用大量肥皂和清水清洗。如果出現皮膚刺激或皮疹，請尋求醫療建議/處置。
若進入眼睛：用清水小心沖洗數分鐘。如戴有隱形眼鏡，且易於取出，請將其取下，繼續沖洗。如果眼部刺激持續，請尋求醫療建議/處置。	
將內容物和容器處置於危險或特殊廢物收集點，並符合當地、區域、國家和/或國際規定。	

訂購信息

型號	項目	數量
01-03-0058	Premier Buffer A Plus Reagent	940mL
01-03-0055	Premier Buffer A Plus Reagent	3.8L

 保存期限	 溫度限制
 請參閱使用說明	 警告

製造業者名稱: Trinity Biotech (Primus Corp dba Trinity Biotech)

製造業者地址: 4231 E. 75TH TERRACE KANSAS CITY, MO 64132 U.S.A

醫療器材商名稱: 佑康股份有限公司

醫療器材商地址: 「(備註: 本項不核定於標籤、說明書或包裝, 市售品請逕依所轄衛生局最新核定之內容刊載醫療器材商地址)」

 製造業者	 型號
 批號	 僅供體外診斷使用